


FIT 설명서


FIT 패키지 포함 내용:



B

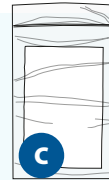


1. 확인합니다

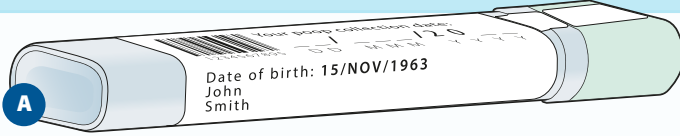


✓ 생년월일 ✓ 이름

귀하의 정보가 맞습니까? 아니라면
LifeLabs(1-833-676-1426)에 연락하십시오


2. 기재합니다

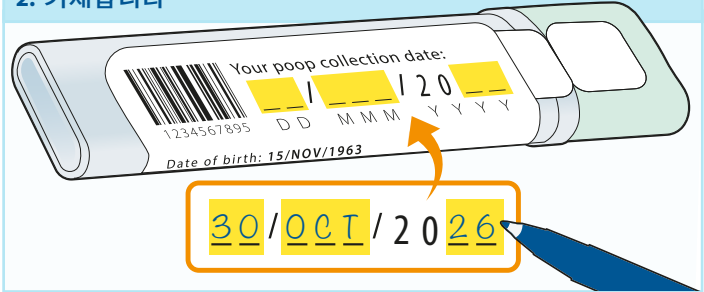

3. 소변을 보고 물을 내립니다

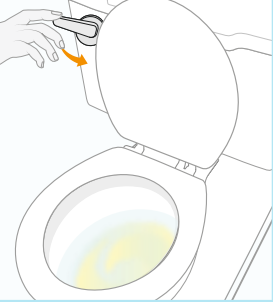



4. 준비합니다

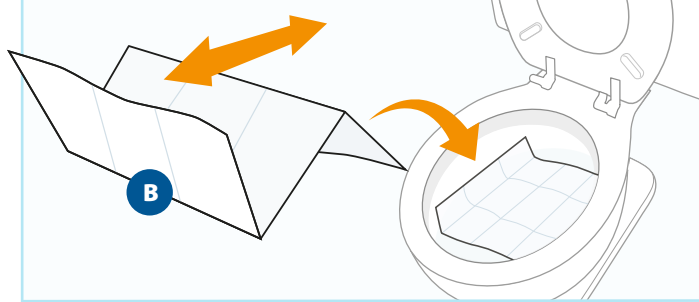

5. 대변을 봅니다




6. 수거합니다

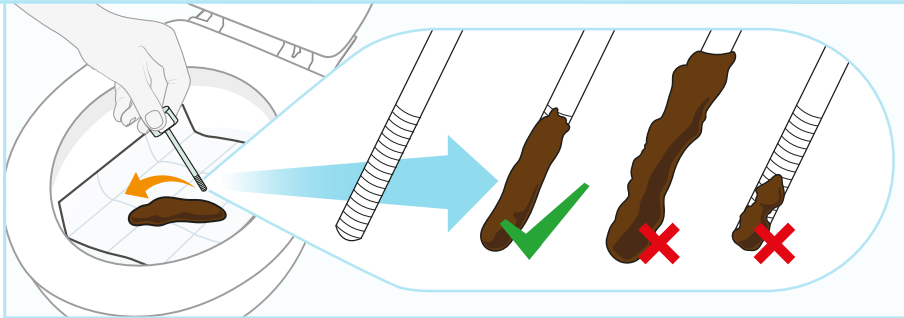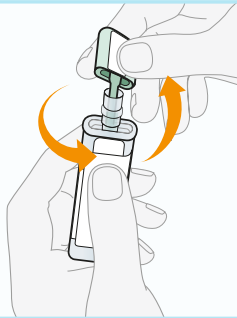


밀봉
합니다

7. 물을 내립니다

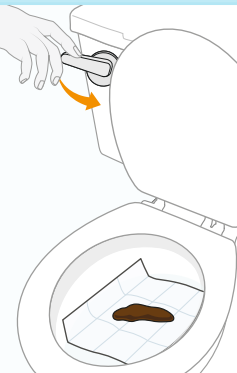

8. 반납하거나 송부합니다

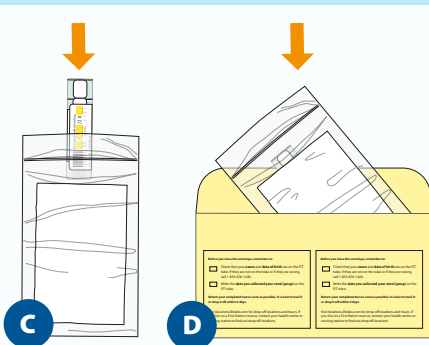

권장 송부 기한

2
일 이내

CANADA POST POSTES CANADA

또는

LifeLabs®
locations.lifelabs.com

또는

원주민 보호 구역에 거주하시는
경우 담당 보건소 또는
간호소에 연락하여 반납
방법을 문의하십시오

이 정보를 이용하는 데 어려움이 있습니까?

1-877-280-8538 | TTY 1-800-855-0511 | info@ontariohealth.ca



Ontario Health
Cancer Care Ontario

자금 지원: Ontario Ministry of Health (온타리오 보건부)
조정: Ontario Health (Cancer Care Ontario), 허가 제공: KAISER PERMANENTE CENTRE FOR HEALTH RESEARCH
(NIH 보조금 번호: UH3 CA 188640) 및 UCSF Health Outcomes Policy & Economics (HOPE) Research Program
KOREAN